



ROYAL CANIN®

HEMATURIA DETECTION

technology by

blücare®

**GRÁNULOS DE ARENA HIGIÉNICA PARA LA DETECCIÓN
PRECOZ DE SANGRE EN LA ORINA DEL GATO**



QUÉ ES


- **Gránulos blancos con un reactivo incorporado** que hace que cambien de color **blanco a azul** cuando entran en contacto con la sangre.
- Una tecnología fiable desarrollada por Blücare que **permite detectar la presencia de microhematuria**.



CÓMO FUNCIONA

4 SENCILLOS PASOS

1

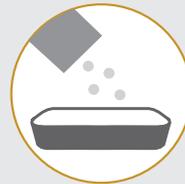

Extiende los gránulos sobre la arena higiénica del gato.

2




Examina la bandeja de arena después de que el gato orine.

3



Si los gránulos son de color blanco, el test es negativo.

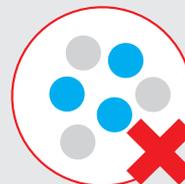

Si se vuelven de color azul, el test es positivo, ya que muestra la presencia de sangre en la orina del gato.


4



Consulta con tu veterinario cuanto antes.

CUÁNDO USARLO

HEMATURIA DETECTION es una herramienta para utilizarse como seguimiento tras un episodio de enfermedad del tracto urinario inferior.

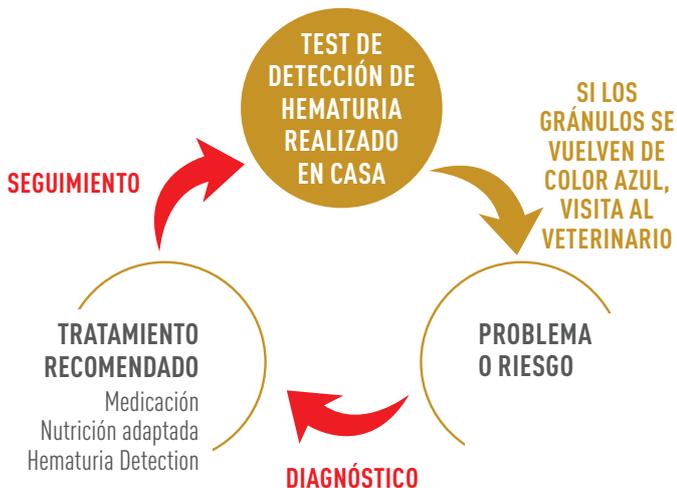



HEMATURIA DETECTION

technology by

blücare

GRÁNULOS DE ARENA HIGIÉNICA PARA HACER UN MEJOR SEGUIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE TRACTO URINARIO INFERIOR (LUTD)

NO ES FÁCIL HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS SIGNOS DE LAS LUTD

LAS RECAÍDAS SON HABITUALES EN LAS ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR



El diagnóstico precoz puede prevenir complicaciones dolorosas recurrentes.

LOS PROPIETARIOS DE LOS GATOS SE PREOCUPAN POR LA SALUD DE SUS MASCOTAS



No tienen los medios necesarios para hacer un seguimiento en casa.

LOS GATOS OCULTAN A MENUDO LOS SIGNOS DE LA ENFERMEDAD



Es difícil detectar de manera precoz los problemas de salud.

LA HEMATURIA ES UN INDICADOR IMPORTANTE EN LA MAYORÍA DE LAS LUTD*



1. La detección temprana puede detener la enfermedad antes de llegar a una fase más grave.
2. Si no se hace una visita al veterinario o se hace demasiado tarde puede causar una enfermedad más prolongada y grave, así como complicaciones posteriores.

UNA HERRAMIENTA INNOVADORA PARA LA DETECCIÓN DE LA HEMATURIA



HEMATURIA DETECTION ES UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LA PRESENCIA DE SANGRE EN LA ORINA DEL GATO Y FACILITA EL CONTROL DE SU SALUD.

UNA REACCIÓN INMEDIATA A LA DETECCIÓN DE HEMATURIA MINIMIZA EL RIESGO DE COMPLICACIONES DE SALUD

Hematuria Detection ha sido desarrollado para ayudarte en tu consulta, **facilitar la monitorización, facilitar el seguimiento para una detección precoz de las recaídas para un mejor mantenimiento de la salud del gato.**

ROYAL CANIN® HEMATURIA DETECTION BY BLÛCARE



GATO

- Permite llevar a cabo la detección de sangre en un entorno sin estrés.
- **No requiere cambios en la bandeja de arena ni en el entorno.**
- **Ayuda a prevenir** que la enfermedad empeore.



PROPIETARIO

- Da tranquilidad al propietario al permitirle controlar la salud urinaria de su gato.
- Ayuda al propietario a saber cuándo es necesario consultar con el veterinario.
- Ayuda a evitar **posibles complicaciones.**



VETERINARIO

- Aumenta la probabilidad de ver a los pacientes en **las fases tempranas de la enfermedad.**
- Una forma de **proporcionar un mejor servicio** a tus clientes y fortalecer la relación con los mismos.
- Su forma de utilización y funcionamiento son **muy fáciles de explicar** al cliente.
- Facilita el cumplimiento de tus recomendaciones por parte del propietario.
- Genera **mayores ingresos** para la clínica.

BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS



SIMPLE

Sencilla incorporación de los gránulos a la arena higiénica**.



RÁPIDO

Resultados evidentes en cuestión de segundos.



CLARO

Los resultados permanecen visibles durante 48h.



SIN ESTRÉS PARA EL GATO



SEGURO

Elaborado con una fórmula segura.



EXCLUSIVO

Producto innovador con la tecnología avanzada de Blücare.



FIABLE

Permite detectar la microhematuria.



FÁCIL DE ALMACENAR

Presentado en una caja con dos sobres de gránulos de 20g.

*Enfermedad del tracto urinario inferior.

**Para garantizar el rendimiento óptimo de los gránulos de HEMATURIA DETECTION se recomienda el uso de arena aglomerante a base de arcilla (bentonita).

